

Bischoff & Bischoff

Mode d'emploi

B+B France S.A.R.L.

Centre d'affaires Parc Lumière
46 avenue des Frères Lumière
F-78190 Trappes
www.b-france.fr


constructeur: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080
www.bischoff-bischoff.com
info@bischoff-bischoff.de

TS-Care



Enjoy mobility.

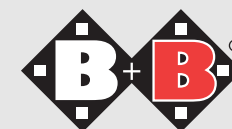

Fauteuil garde-robe „TS-Care“ (sans roulettes)

Chère cliente, cher client,

Le fauteuil garde-robe B+B que vous venez d'acquérir est un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues.

Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre fauteuil garde-robe B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre produit vous apportera une grande satisfaction.

1. Attention - Consignes de sécurité! (Analyse des risques conforme à DIN EN ISO 13485)

- Poids maximal de l'utilisateur: 120 kg!
- Utilisation du fauteuil garde-robe uniquement avec l'aide d'une tierce personne!

2. Indications

Absence de contrôle du tronc, troubles de l'équilibre, déficiences fonctionnelles majeures aux extrémités inférieures, raideurs des hanches et de la colonne vertébrale, amputation d'une main, tétraplégie, handicap du bras avec important déficit de la fonction de préhension.

3. Livraison

Le TS-Care est livré entièrement monté.

4. Vue d'ensemble

- Dossier
- Accoudoir
- Tablette de siège rembourrée
- Siège rembourré avec ouverture
- Seau à toilette
- Verrou de réglage de la hauteur du siège



Fig. 1

5. Siège

Le siège rembourré peut être retiré pour le nettoyage du fauteuil. Vérifiez avant chaque utilisation que l'assise est parfaitement fixée au cadre (3 clips d'arrêt enclenchés).



Attention!
Risque de pincement.

6. Seau à toilette

Pour changer ou vider le seau à toilette, il vous suffit de le retirer de son support à l'arrière du fauteuil garde-robe.

Le seau à toilette est étanche aux odeurs lorsque le couvercle est posé.

7. Réglage de la hauteur du siège

Pour régler la hauteur de votre fauteuil garde-robe, retirez les goupilles d'arrêt au niveau des 4 pieds et réglez la position souhaitée. La hauteur du siège peut être réglée sur 5 positions.




Attention!
Réglez les 4 pieds à la même hauteur.



Fig. 2



Fig. 3

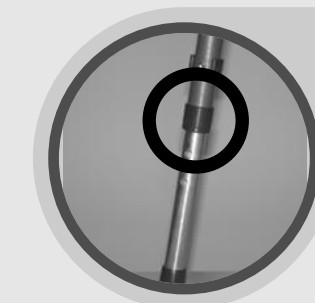

A Fig. 4

8. Entretien

Grâce à un entretien régulier, votre fauteuil garde-robe B+B conservera année après année son aspect esthétique.

En cas de forte salissure, il est conseillé d'utiliser un nettoyeur ou un désinfectant disponible dans le commerce.

Pour le nettoyage, n'utilisez aucun produit agressif ou caustique!

9. Caractéristiques techniques

- Largeur du siège: 40 cm
- Profondeur du siège: 42 cm
- Hauteur du siège: 50-60 cm
(5 positions de réglage)
- Hauteur des accoudoirs: 19,5 cm
(16 cm avec tablette de siège)
- Hauteur du dossier: 2 cm
(29 cm avec tablette de siège)
- Dimensions (L/l/H): 54-55 cm / 56,5 cm
/ 81,5-91,5 cm
- Poids total: 6 kg
(7,7 kg avec tablette de siège)
- Poids maximal de l'utilisateur: 120 kg

10. Garantie

La garantie s'applique uniquement si les conditions d'utilisation de destination du produit sont respectées. Tout renvoi du produit doit se faire dans l'emballage d'origine.

Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: TS-Care

Numéro de série:*

(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon

* Les références se trouvent sur les côtés du châssis.